




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, manuelt højderegulérbart med gascylinder R4650
Produktbeskrivelse	VVS: 654002100 NRF: 6132532 RSK: 7972590 EAN: 5708590309439 HMI: 71762 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473  PLUS vaskophæng fås i elektrisk, pneumatisk (gasdrevet) og manuelt højderegulérbare versioner. De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner. PLUS vaskophæng med gascylinder. Betjeningsgreb placeret ved front af håndvask. Betjeningsgrebet kan fungere som håndklædeholder, og kan placeres på højre eller venstre side af vasken. Manuelt højderegulérbart 300 mm (trinløst) uden brug af værktøj. Anbefales med til- og afløbssystem R2067/R2065. Materialer: Aluminium og kunststof. Inkl. monteringsbolte til håndvask. Ekskl. monteringskruer til væg.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulérbar 300 mm Maksimal belastning: 135 kg. Passer til vaske der vejer op til 22 kg. Når vasken belastes med 135 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 57 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 135 kg og vasken vejer 22 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 151 kg støtter sig til vasken.

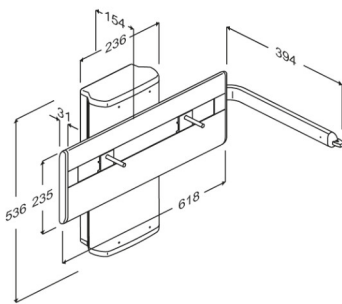

Produkt Varenummer	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, manuelt højderegulérbart med gascylinder R4650
Materialer Ergonomi Funktioner	Vaskophængen er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Endeaftækningsgrebene er fremstillet i ABS. Vaskophængen leveres med et betjeningsgreb, der består af en kontakt i ABS, der er placeret for enden af et fast greb i anodiseret aluminium. Håndvasken kan bevæges op og ned ved hjælp af betjeningsgrebet. Det er let og enkelt for en hjælper eller for en selvhjælpen bruger at indstille håndvasken til den ønskede højde. Vaskophængen passer til alle typer håndvaske med boltmontering. Afrundet og slankt design gør rengøringen let og ukompliceret. Betjeningsgrebet er monteret for enden af et fast greb, der kan fungere som støtte og håndklædeholder. Betjeningsgrebet er som standard placeret i højre side, men kan også placeres i venstre side. Vaskophængen leveres som standard med en gascylinder til vaske der vejer 16-22 kg, men kan leveres med andre belastningsmuligheder på forespørgsel.
Garanti Rengøring	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl. Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS vaskophæng med betjeningsgreb, manuelt højderegulérbart med gascylinder
Varenummer	R4650
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i: - Rådets forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr - Maskindirektivet 2006/42/EØF

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®