


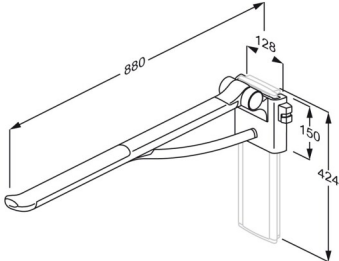

PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS toiletstøtte, højderegulérbar R3108000
Farve	VVS:615853200 NRF:6190561 EAN:5708590307015 HMI: 71786 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Hvid
Produktbeskrivelse	 PLUS toiletstøtte, 880 mm, ergonomisk udformet, så den sikrer et godt greb, både når man står og når man sætter og rejser sig. Højrehåndsbetjent. Højderegulérbar uden brug af værktøj. Aftagelig og opklappelig. Materialer: Aluminium og termoplastisk elastomér, hvilket giver en slidstærk og rengøringsvenlig overflade. Til eftermontering på lodret vægskinne (medfølger ikke) eller brede SELECT toiletløftere. PLUS toiletstøtte, 880 mm, ergonomisk udformet, så den sikrer et godt greb, både når man står og når man sætter og rejser sig. Højrehåndsbetjent. Højderegulérbar uden brug af værktøj. Aftagelig og opklappelig. Materialer: Aluminium og termoplastisk elastomér, hvilket giver en slidstærk og rengøringsvenlig overflade. Til eftermontering på lodret vægskinne (medfølger ikke).
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulérbar 240 mm Maksimal belastning: 150 kg. Når toiletstøtten belastes med 150 kg, belastes hver monteringsskrue i den lodrette vægskinne med 50 kg. <i>PLUS toiletstøtter er testet statisk med hhv. 700 kg (tæt på væggen), 425 kg (midt på) og 225 kg (på yderste punkt).</i>
Materialer	Toiletstøtten er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Gribefladerne er beklædt med en skridsikker overflade af en termoplastisk elastomér, der omslutter en glasforstærket nylonkerne.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS toiletstøtte, højderegulérbar
Varenummer	R3108000
Ergonomi	Støttens ovale tværsnit (33 x 51 mm) sikrer et godt greb - både når man står, og når man sætter sig og rejser sig. Støttens afslutning er udformet, så håndens greb er fast og sikkert. Afslutningen er især en god støtte, når man sætter eller rejser sig. Samtidig opnås en klar fornemmelse af, hvor støtten slutter. Blødt og skridsikkert overflademateriale, der aldrig føles koldt.
Funktioner	Undersiden af støtten er udformet til montering af forskelligt tilbehør. Toiletstøtten kan klappes op.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	PLUS toiletstøtte, højderegulérbar
Varenummer	R3108000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon WipeClean UniversalCleaning Chlorine Disinfection Wipes IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand. Tilsluttet brug Toiletstøtten bruges som hjælp til en person, når han eller hun sætter sig på eller rejser sig fra et toilet, eller ved sideværts forflytning fra en kørestol. Betjeningsmiljø Til indendørs brug i våde omgivelser, som f.eks. et badeværelse eller vaskerum, i private hjem, på plejehjem og hospitaler. Ved institutionsbrug er den forventede levetid 10 år. <i>Der er foretaget levetidstest iht. ISO 17966:2016.</i> For vedligehold, se brugermanual som er vedlagt produktet, og som kan findes på hjemmesiden under "Downloads".



PRESSALIT®

Produkt	PLUS toiletstøtte, højderegulérbar
Varenummer	R3108000

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®