


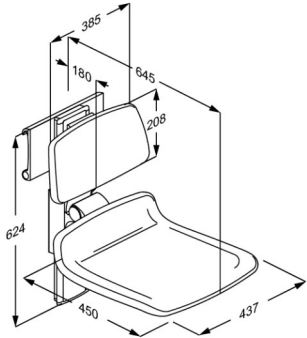

PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS brusesæde 450, manuelt højde- og sideværts regulérbart R7440112000
Farve	VVS: 777536200 NRF: 6311181 EAN: 5708590312231 HMI: 71796 NBS: N13:448 FDA: INN/D135865 Hvid
Produktbeskrivelse	 PLUS brusesæde 450, med ryglæn. Manuelt højderegulérbart 360 mm samt sideværts regulérbart uden brug af værktøj. Sæde er opklappeligt. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Til eftermontering på vandret PLUS vægskinne (medfølger ikke). PLUS brusesæde 450, med ryglæn. Manuelt højderegulérbart 360 mm samt sideværts regulérbart uden brug af værktøj. Sæde er opklappeligt. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Materialer: Blødt og komfortabelt PUR-skum med trækerne, monteret på aluminiumprofil. Til eftermontering på vandret PLUS vægskinne (medfølger ikke).
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højde- og sideværts regulérbar 360 mm Maksimal brugervægt: 200 kg. Når sædet belastes med 200 kg, belastes hver monteringsskrue med 23 kg. <i>PLUS brusesæder er testet statisk med en sikkerhedsfaktor på 1,5 i henhold til de anvendte hjælpemiddelstandarder.</i>
Materialer	Brusesædet er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Sædet består af polyurethanskum der er støbt omkring en kerne af krydsfinér, og omstøbt med en overflade af klar PU-lak. Afslutningerne på ryglæn og sæde er forseglet med endepropper i ABS.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS brusesæde 450, manuelt højde- og sideværts regulérbart
Varenummer	R7440112000
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Vigtigt: PUR-overflader på PLUS brusesæder og PLUS ryglæn indeholder en anti-bakteriel coating, som kan blive ødelagt såfremt der anvendes andet end vand og sæbe til rengøring. Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.

pressalit.com

PRESSALIT®