


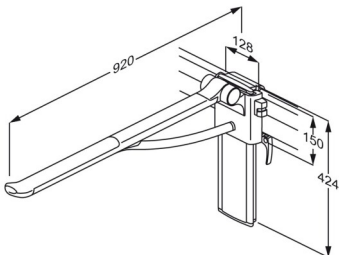

PRESSALIT®

Produkt Varenummer	PLUS toiletstøtte, højde- samt sideværts regulérbar R3585112000
Farve	VVS:615857200 NRF:6190597 RSK:8980424 EAN:5708590308371 HMI: 71764 NBS:N13:436 FDA:ILS/D135866 Hvid
Produktbeskrivelse	 PLUS toiletstøtte, 920 mm, ergonomisk udformet, så den sikrer et godt greb, både når man står og når man sætter og rejser sig. Højrehåndsbetjent. Højde regulérbar 240 mm og sideværts regulérbar uden brug af værktøj. Aftagelig og opklappelig. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Materialer: Aluminium og termoplastisk elastomér, hvilket giver en slidstærk og rengøringsvenlig overflade. Til eftermontering på vandret vægskinne (medfølger ikke). PLUS toiletstøtte, 920 mm, ergonomisk udformet, så den sikrer et godt greb, både når man står og når man sætter og rejser sig. Højrehåndsbetjent. Højde regulérbar 240 mm og sideværts regulérbar uden brug af værktøj. Aftagelig og opklappelig. Antracitgrå afdækningsplade på lodret vægskinne. Materialer: Aluminium og termoplastisk elastomér, hvilket giver en slidstærk og rengøringsvenlig overflade. Til eftermontering på vandret vægskinne (medfølger ikke).
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højde- og sideværts regulérbar 240 mm Maksimal belastning: 150 kg. Når toiletstøtten belastes med 150 kg, belastes hver monteringskrue i den vandrette vægskinne med 44 kg. <i>PLUS toiletstøtter er testet statisk med hhv. 700 kg (tæt på væggen), 425 kg (midtpå) og 225 kg (på yderste punkt).</i>



PRESSALIT®

Produkt	PLUS toiletstøtte, højde- samt sideværts regulérbar
Varenummer	R3585112000
Materialer	Toiletstøtten er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Gribefladerne er beklædt med en skridsikker overflade af en termoplastisk elastomér, der omslutter en glasforstærket nylonkerne.
Ergonomi	Støttens ovale tværsnit (33 x 51 mm) sikrer et godt greb - både når man står, og når man sætter sig og rejser sig. Støttens afslutning er udformet, så håndens greb er fast og sikkert. Afslutningen er især en god støtte, når man sætter eller rejser sig. Samtidig opnås en klar fornemmelse af, hvor støtten slutter.
Funktioner	Blødt og skridsikkert overflademateriale, der aldrig føles koldt. Undersiden af støtten er udformet til montering af forskelligt tilbehør. Toiletstøtten kan klappes op.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



PRESSALIT®

Produkt	PLUS toiletstøtte, højde- samt sideværts regulérbar
Varenummer	R3585112000
Rengøring	" Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand. "



PRESSALIT®

Produkt	PLUS toiletstøtte, højde- samt sideværts regulérbar
Varenummer	R3585112000
	Tilsigtet brug Toiletstøtten bruges som hjælp til en person, når han eller hun sætter sig på eller rejser sig fra et toilet, eller ved sideværts forflytning fra en kørestol. Betjeningsmiljø Til indendørs brug i våde omgivelser, som f.eks. et badeværelse eller vaskerum, i private hjem, på plejehjem og hospitaler. Ved institutionsbrug er den forventede levetid 10 år. <i>Der er foretaget levetidstest iht. ISO 17966:2016.</i> For vedligehold, se brugermanual som er vedlagt produktet, og som kan findes på hjemmesiden under "Downloads".

pressalit.com